



<u>РАДИКАЛ</u>

Беспроводное гамма-детектирующее устройство для поиска сторожевых лимфоузлов



Беспроводное гамма-детектирующее устройство для поиска сторожевых лимфоузлов

НАЗНАЧЕНИЕ

🔳 поиск сторожевых лимфоузлов, меченных РФП

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

предоперационное и интраоперационное обнаружение СЛУ при реализации метода биопсии СЛУ для оптимизации тактики лечения опухолей кожи, молочной железы, опухолей в области головы и шеи, внутренних органов и других локализаций, при которых применяется метод БСЛУ



ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИЕ ЗОНДЫ

 Лапароскопические зонды позволяют обнаружить СЛУ при труднодоступной локализации (например, при раке шейки матки)


По дополнительному запросу может быть изготовлен зонд с пользовательскими параметрами




НЕСТАНДАРТНЫЕ РЕШЕНИЯ

Возможность изготовления зонда со следующими индивидуальными параметрами:

- Длина зонда
- Угловое разрешение
- Чувствительность детектора

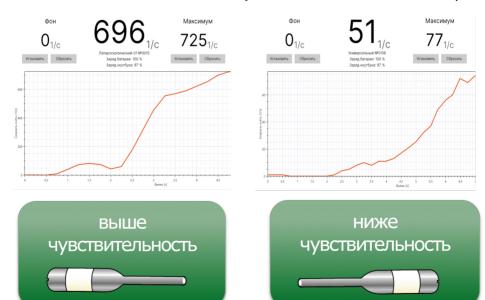

УСТРОЙСТВО ЗОНДА

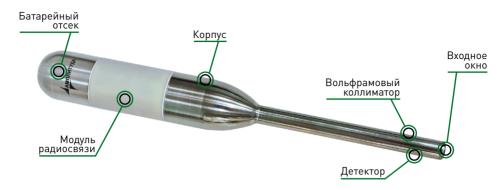

- Коллиматор предотвращает регистрацию детектором бокового излучения, обеспечивает высокое угловое разрешение
- Герметичные корпуса зондов выполнены из медицинской нержавеющей стали
- Отсутствие внешних электрических разъемов, кнопок и каких-либо других открытых отверстий в корпусе зонда позволяет проводить его стерилизацию* газовым и жидкостным методами для интраоперационного применения без защитного стерильного чехла


*Нагревание зонда до температур более 50° С недопустимо

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Устройство накопления и отображения информации (персональный компьютер) с ПО «Радикал»
- Один или набор зондов для поиска СЛУ различных локализаций
- Контрольный источник (опция)
- Элементы питания типа ААА (1 комплект)
- Паспорт, руководство по эксплуатации
- Копия регистрационного удостоверения на медицинское изделие

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

- Настраиваемый звуковой сигнал, пропорциональный интенсивности регистрируемого излучения
- Возможность вычитания фона
- Автоматическое обнаружение зондов
- Отображение показаний детектора числовом виде и на графике

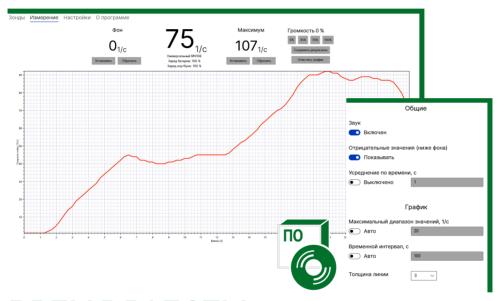

ВРЕМЯ РАБОТЫ

- Зонд питается от двух стандартных элементов питания типоразмера ААА («мизинчиковых» батареек), по запросу возможна комплектация другими элементами питания. Замена выполняется пользователем самостоятельно
- Время непрерывной работы от одного комплекта батарей более 300 часов
- Зонд автоматически переключается между рабочим режимом и режимом ожидания, в котором потребление энергии минимально и позволяет хранить зонд без замены батарей не менее полугода

ПРЕИМУЩЕСТВА

УНИКАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Благодаря уникальной конструкции, зонды сочетают в себе высокую чувствительность, механическую прочность и высокое пространственное разрешение

- 1									
	Беспроводное соединение с зондом								
	Защита от магнитного излучения позволяет использовать детектор одновременно с коагулятором								
	Показания зонда отображаются на мониторе в виде числа и графика, а также дублируются настраиваемым звуковым сигналом								
НА	ДЕЖНОСТЬ								
	Герметичные корпуса зондов выполнены из медицинской								

нержавеющей стали	
Каждый зонд питается от двух элементов питания	типоразме-
ра ААА ("мизинчиковых" батареек)	·

1	•		•	•				
Время	непрерывной	работы	от	одного	комплекта	-	более	300
часов								

БЕЗОПАСНОСТЬ

УДОБСТВО

Отсутствие электрических разъемов и каких-либо других открытых отверстий в корпусе зонда позволяет использовать детектор одновременно с коагулятором

РЕЖИМ СНА

Режим сна активируется автоматически, что очень удобно, когда детектор не используется

г. Москва, Зеленоград, проспект Генерала Алексеева, д. 15

> тел: +7 495 777 13 59 www.amplituda.ru